


2. GEDEELDE ZIJBESCHERMING

Gedeelde onrusthekkens bieden flexibiliteit wanneer nodig en hebben talrijke voordelen op vlak van valpreventie, mobiliteit en het behoud van de autonomie van de bewoners.

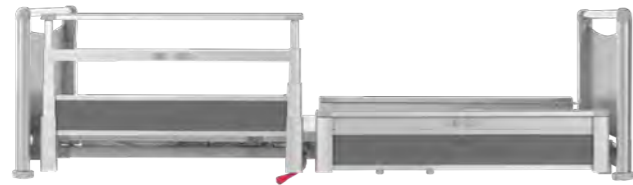

TWIN

Deze gesplitste onrusthekkens zijn verkrijgbaar in **enkele** of **dubbele** versie. De dubbele versie biedt bescherming over de volledige lengte van het bed. Twin onrusthekkens kunnen ook als opstahulp dienen. Een geïntegreerde veiligheid verhindert het onbedoeld neerhalen van het onrusthekken.

Max. matrashoogte Twin onrusthekkens: 18 cm.



DUOSAFE

DuoSafe panelen beschermen de patiënt over 3/4 van de bedlengte. Via de **geïntegreerde bedieningspanelen (*)** kunnen patiënt en verpleging bedfuncties en optioneel bepaalde voorzieningen in de kamer bedienen.

Max. matrashoogte DuoSafe onrusthekkens: 18 cm.

Ook wanneer **het bed wordt verlengd** voldoet dit aan de veiligheidsnorm IEC 60601-2:52, aangezien de opening tussen zijhek en voetgedeelte voldoende groot is om geen klemgevaar te veroorzaken (> 318 mm).

(*): optie

BESCHERMING TEGEN INKLEMMING IEC 60601-2-52

Alle gedeelde onrusthekkens van Haelvoet voldoen aan de veiligheidsnorm IEC 60601-2:52. Deze Europese geharmoniseerde norm bepaalt de afstand tussen zijhek en hoofdgedeelte (< 60 mm), tussen ligvlak en zijhek (< 120 mm), tussen zijbalken (< 120 mm), tussen gedeelde onrusthekkens (< 60 mm of > 318 mm) en tussen zijhek en voetgedeelte (< 60 mm of > 318 mm).



TWIN

Volledige veiligheid

Bij gebruik van de **bedverlenging** dient gekozen te worden voor het Twin verlengstuk om een optimale veiligheid te garanderen.