

Domus Ergo-line Flex

18251 In aller Seelenruhe und Gemütlichkeit optimalen Sitzkomfort genießen: Das ist der Kerngedanke des Domus Ruhesessels. Der Ergo-line Mechanismus kippt simultan die Rückenlehne, den Sitz und die Beinstütze in eine "Zero Gravity" Position. Die optionale "Raising & Sitting Assist" bietet ergonomische Unterstützung beim Aufstehen und Hinsetzen – dank der unterstützenden Bewegung der Sitzfläche.

Gestell

- Die abgerundeten Seitenteile sind aus 2 OSB-Platten (Dicke: 30 mm) hergestellt und mittels einer Stahlkonstruktion stark miteinander verbunden.
- Komplett gepolsterte Seitenteile mit feuerhemmendem Schaum und doppelter Steppnaht.
- Komfortable abgerundete Armlehnen (± 4 cm).
- Alle Seiten und Ecken sind abgerundet.
- Keine Sichtbare Befestigungspunkte.
- Design Laufrollen $\varnothing$ 65 mm mit Bremse (für das Umräumen des Sessels ohne Patient).
- Beine aus massiven Buchenholz (leicht konisch) mit Gleitern aus Kunststoff (vorn) und 2 integrierte Laufrollen (hinten) sind auf Anfrage erhältlich.

Sitz

- Abnehmbarer Sitz in melaminharzbeschichteter MDF-Platte, Dicke 12 mm.
- Der abgerundete Sitz behindert den Blutkreislauf nicht.
- Komfortable Sitzhöhe (45 cm).
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. 2 Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Komplett gepolstert mit doppelter Steppnaht.

Rückenlehne und Beinstütze

- Ergonomisch vorgeformte Schale aus Schichtholz, Dicke 12 mm.
- Mit feuerhemmendem Schaum gepolstert. 3 Zonen mit unterschiedlicher Densität optimieren den Sitzkomfort.
- Komplett gepolstert mit doppelter Steppnaht.
- Beinstütze: Schichtholz, Dicke 10 mm und mit feuerhemmendem Schaum gepolstert.

Ergo-line Mechanismus

- Kippt simultan die Rückenlehne, den Sitz und die Beinstütze in eine "Zero Gravity" Position (*) mit einem Hebel, der sich auf der rechten Innenseite des Sessels befindet.
- Der Winkel zwischen dem Sitz und der Rückenlehne variiert zwischen 100° (Sitzposition) und 142° (Zero Gravity Position).
- Der Sitz kippt bis zu 25°, wenn der Relaxmechanismus aktiviert wird.
- Eine Gasfeder minimisiert die benötigte Betätigungskraft des Mechanismus.
- Verriegelung in jeder Position möglich, mittels eines Hebels.
- In der Sitzposition ist die Beinstütze zur Förderung des Aufstehens nach innen gekippt.

Farben

Bitten Sie uns um unser reichhaltiges Angebot an Farben.
Musterkarte + Muster auf Anfrage erhältlich.


(*) "Zero Gravity" Position: Diese Sitz-/Liegeposition ist auf Daten der NASA gegründet. In dieser neutralen Körperposition befinden alle Muskelkräfte sich in einem biomedizinischen Gleichgewicht. ("From outer space to you", Omni, March 1994.)



Maße

18251 | Domus Ergo-line Flex:

- B 62 x T 73 x H 122 cm
- Sitzhöhe: 45 cm
- Sitztiefe: 51 cm
- Sitzbreite: 53 cm
- Höhe der Armlehnen: 66 cm
- Sichere Arbeitslast: 135 kg

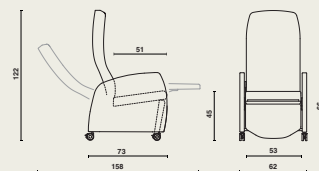

Materialien und Gestaltung

- Holz: Buche (massiv), Schichtholz, OSB, MDF-Platte.
- Metall: epoxybeschichtet (schwarz).
- Feuerhemmender Schaum.
- Bezug: siehe Kollektion.
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen**: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien.

Optionen

- Holz oder Kunststoff Armlehnen.
- Esstablett.
- Abduktionskeil in Kombination mit Esstablett.
- Manuell einstellbare Beinstütze.
- Sitzpolster mit einer Oberschicht aus 40 mm viskoelastischem Schaum und bi-elastischem Bezug (auch möglich für Beinstütze).
- Anatomisches Reduktionskissen.
- Ohrenbacken.
- Fixationsbügel.
- Abnehmbare gepolsterte Armlehnen.
- Halter für Infusionständer und/oder Infusionständer $\varnothing$ 19 mm.
- Holzbeine mit Laufrollen hinten.
- Esstablethalter an der Rückenlehne.
- Laufrollen $\varnothing$ 100 mm mit Bremse.
- Laufrollen $\varnothing$ 100 mm mit Bremse und Richtungsfeststeller.
- Ausziehbare Fußstütze aus Kunststoff (nur mit Laufrollen $\varnothing$ 100 mm).
- Ergonomischer Schiebebügel aus Kunststoff an der Rückenlehne (nur mit Laufrollen $\varnothing$ 100 mm).
- Abnehmbares und verstellbares Kopf/Nackenkissen.
- Das obere Rückenteil ist abnehmbar.
- Raising & sitting assist.



HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE

Weil Haelvoet ständig technologische Fortschritte anstrebt, behält Haelvoet sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten vorzunehmen.