

ZenSo Duo-line

20107 De ZenSo relaxzetel is uitgerust met een speciaal voor de zorg ontwikkeld relaxmechanisme. Het Duo-line mechanisme voorziet een individuele verstelling van rug- en beensteun d.m.v. een gasveer.

Onderstel

- Gegoten aluminium design-voet.
- Afgewerkt met epoxy-coating.
- Alle buitenranden en hoeken zijn afgerond.
- De poten zijn voorzien van kunststof vloerbeschermers.

Rugsteun

- Bestaat uit een ergonomisch gevormde multiplex schelp, dikte 12 mm.
- Bekleed met brandvertragend schuim uit 2 verschillende densiteitszones voor optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerde rug met dubbele stiklijn.

Zitting en beensteun

- Zitting en beensteun bestaan uit één geheel, eenvoudig afneembaar zonder gereedschap.
- Zitting en beensteun zijn gemaakt uit plaatmateriaal, dikte 12 mm, bekleed met brandvertragend traagschuim met 3D structuur voor een optimaal zitcomfort.
- Volledig gestoffeerd met dubbele stiklijn.
- De afgeronde zitting bevordert de bloeddoorstroming.
- Optimale ondersteuning voor de benen dankzij telescopisch beensteun (+70 mm), waardoor ook geen plooiën in de bekleding ontstaan.
- Vrije keuze zithoogte d.m.v. een spacer (42,5 cm, 45 cm of 47,5 cm).
- Keuze uit 2 verschillende zitdieptes: 46 cm (small) of 50 cm (large).

Armsteunen

- Gesloten, gestoffeerde armen optioneel met kunststof of houten opdek.

Duo-line mechanisme:


- Individuele verstelling van rug- en beensteun d.m.v. een gasveer.
- De gasveer minimaliseert de benodigde activatiekracht van rugsteun en beensteun.
- Wanneer de rugsteun naar achter wordt geplaatst, inclineert de zitting mee van 7° tot 20°.
- Een hendel wordt gebruikt om rugsteun (rechter hendel) en beensteun (linker hendel) te activeren en te vergrendelen in elke positie.



Afmetingen

ZenSo Duo-line:

- B 68 x D 71-151 cm
- Hoogte: afhankelijk van gekozen zithoogte
- Veilig gewicht: 150 kg

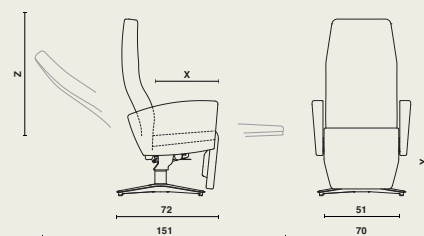

Zitdiepte X	Zithoogte Y	Rughoogte Z	Geschikt voor lichaamslengte
46 cm	42,5 cm	84 cm	< 164 cm
46 cm	45 cm	84 cm	164 - 176 cm
50 cm	45 cm	84 cm	
50 cm	47,5 cm	84 cm	> 176 cm

Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: Multiplex, MDF.
- Metaal: epoxy-coating (zwart).
- Kunststof.
- Brandvertragend schuim.
- Stoffering: volgens collectie.
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verdere info over de gebruikte **materialen**, **constructie** en **onderhoud**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Zit- en beensteun met visco-elastisch schuim en bi-elastische hoes.
- Beensteun met anatomische reductor.
- Rugsteun met afneembaar hoofddeel.
- Accessoirehaakjes.
- Fixatiebeugel.
- Eettafelhouder op rug.
- Opstahulp.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma. Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

(*) "Zero gravity" positie: deze zit/lighouding is geïnspireerd op NASA-data over een neutrale lichaamspositie, die alle spierkrachten omzet tot een biomedisch evenwicht. Bron: "From outer space to you", Omni, March 1994.

